

**KLINISK KEMI**Handläggare  
MS/ya

Direkttelefon

Datum  
2019-05-22  
Ert datumVår beteckning  
11-2019  
Er beteckning

Till våra beställare

**Ny lot på internkontroll till HemoCue Glukos**

**Senast den 29 maj 2019 behöver ni byta till en ny lot** av GlukoTrol-NG nivå 2 eftersom den gamla passerar utgångsdatum under juni.

- Hämta internkontrollen på närmaste kliniskt kemiska laboratorium, den ska inte beställas från Mediq.
- Börja på ett nytt kontrollprotokoll i samband med bytet.
- Kassera kontrollflaskorna från föregående lot.

Internkontrollen ska analyseras varje dag ni har ett patientprov, se vidare:  
<http://livlinan.liv.se/Vardanvisningar/Laboratoriemedicin/Laboratoriemedicin/Patientnara-analys-PNA/Glukos/>

Kontaktperson: Mirjam Sköld, PNA-samordnare, telefon 054-19 15 32,  
epost: [mirjam.skold@regionvarmland.se](mailto:mirjam.skold@regionvarmland.se)  
eller din lokala PNA-samordnare, se <http://livlinan.liv.se/Vardanvisningar/Laboratoriemedicin/Laboratoriemedicin/Patientnara-analys-PNA/pna-samordnare-laboratoriemedicin/>



Mattias Aldrimer  
Tf Verksamhetschef