

# MEMO Dayboard

Nyheter



ABILIA

# Nyheter i MEMO Dayboard

## 1. Ändrat produktnamn

- Från MEMOdayplanner till MEMO Dayboard

## 2. Uppgraderad hårdvara och design


- Ny sidopanel för inställningar och larm
- Förbättrade tidpelare med tydligare ljuspunkter

## 3. Enklare att komma igång med och använda

- Använd sidopanelen för inställningar och larm  
*Förbättringar*  
*Enkelt att testa larmljud och ljusstyrka*  
*Använd låsläge för att skydda inställningarna*
- Enkelt att ansluta manöverkontakt

## 4. Enklare skötsel och service

- Enkelt att ersätta trasig nätadapter
- Ny funktion Fabriksåterställning förenklar rekonditionering

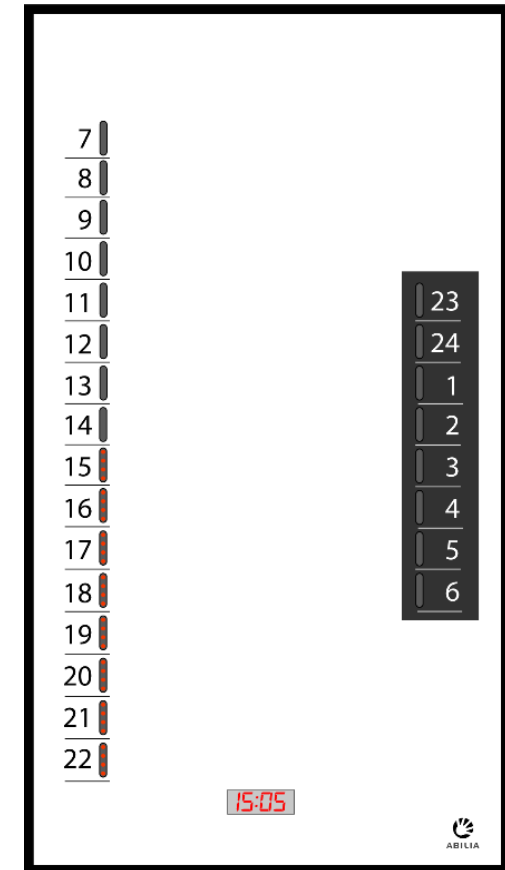

# 1. Ändrat produktnamn

## Syfte:

För att göra det enklare att skilja mellan "MEMOdayplanner" och "MEMOplanner"

➔ Den nya modellen fick namnet MEMO Dayboard

MEMO Timer



MEMOday



MEMOmessenger



MEMO Dayboard




MEMOplanner



## 2. Uppgraderad hårdvara och design

### MEMOdayplanner 3

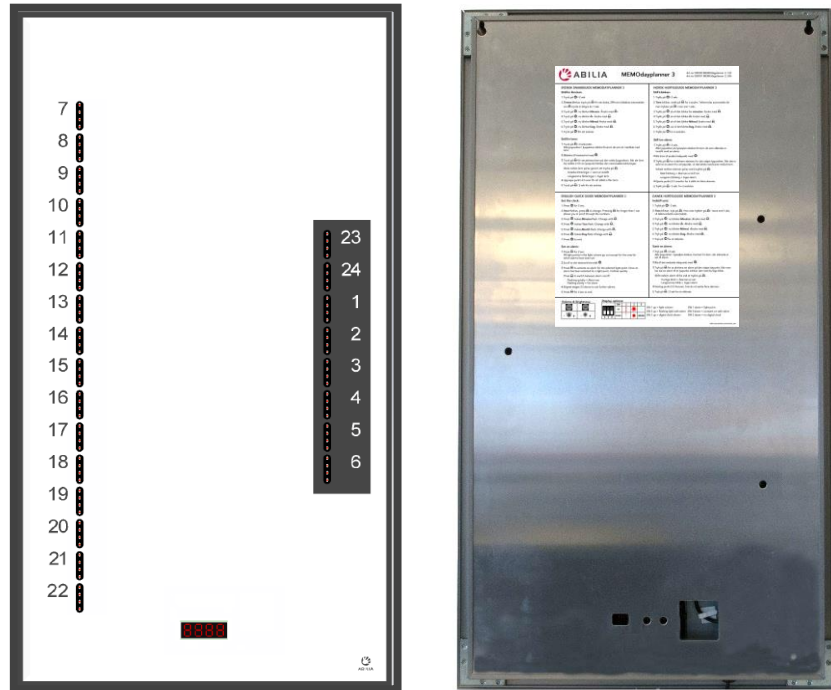


### MEMO Dayboard



- Ny sidopanel för inställningar och larm
- Förbättrade tidpelare (tydligare ljuspunkter, bättre kontrast och betraktningvinkel)
- Tydligare tidsmarkeringar bredvid tidpelarna
- Högtalare med högre maxvolym
- Slät bakplatta
- Förbättrad väggupphängning

# 3. Enklare att komma igång med och använda

## MEMOdayplanner 3

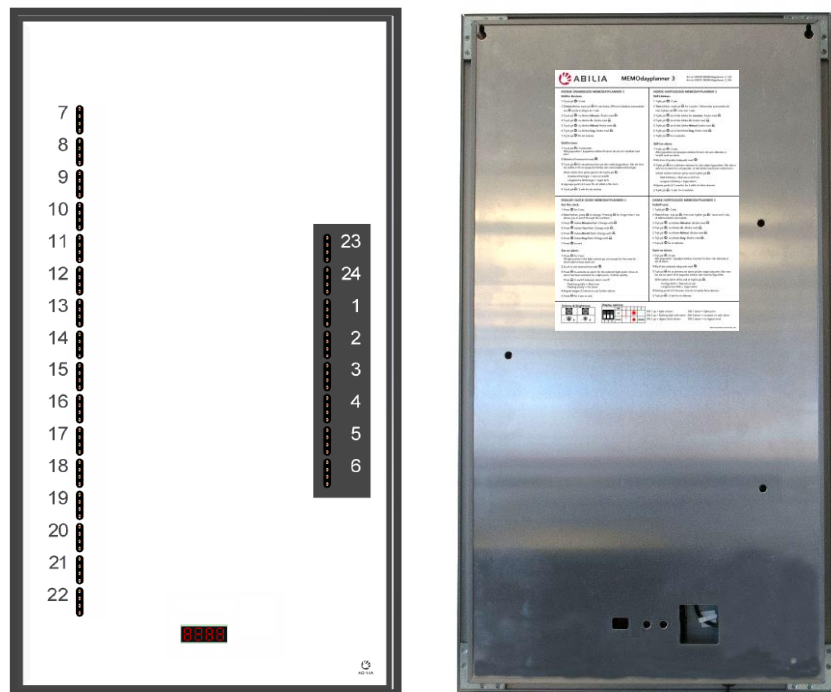

- Ställ in tid och larm via knappar på undersidan
- Anpassa tidvisning och ljusstyrka på baksidan med hjälp av verktyg

## MEMO Dayboard




- Använd sidopanelen för inställningar och larm  
*Förbättringar*  
*Enkelt att testa larmljud och ljusstyrka*  
*Använd låsläge för att skydda inställningarna*
- Enkelt att ansluta manöverkontakt (för att stänga av larm)



# 4. Enklare skötsel och service

## MEMOdayplanner 3

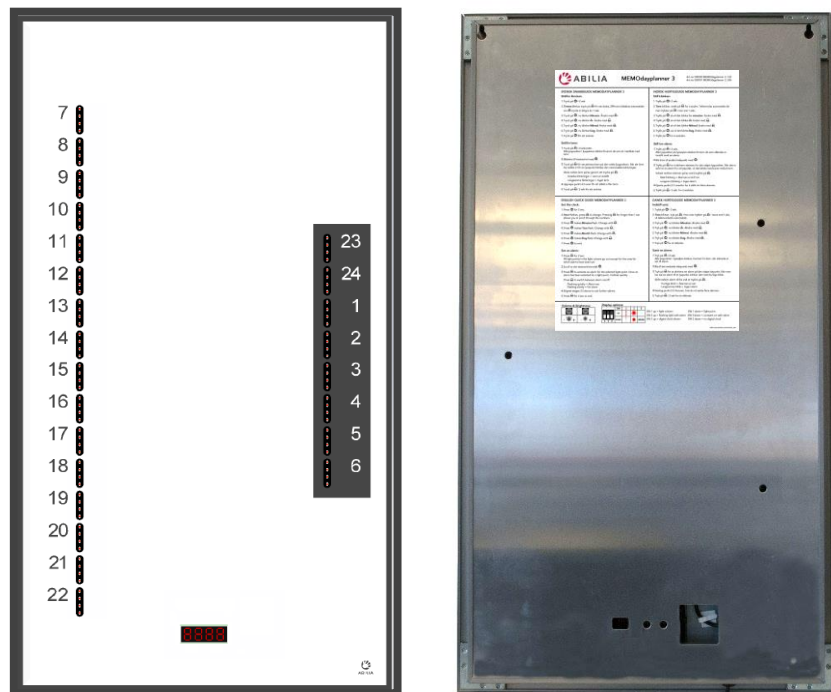


- För byte av nätadapter, ta bort bakplattan och anslut ny
- För rekonditionering, nollställ en inställning åt gången och ta bort alla larm manuellt

## MEMO Dayboard



### Återställ till fabriksinställningar

Det kan vara lämpligt att återställa MEMO Dayboard om den ska förberedas för en ny användare eller vid felsökning. Återställning till fabriksinställningar raderar alla larm och sätter alla inställningar till standardvärden.

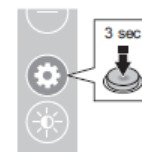

1. Gå in i inställningsläget.



2. Tryck och håll in + och – knapparna för att återställa enheten till fabriksinställningar.

- För byte av nätadapter, koppla in ny på sidopanelen
- För rekonditionering, använd den nya funktionen Fabriksåterställning