
Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet.

Tyngdväst Somna Balance

Leverantör: Abilia

Lev. art.nr: Junior 4 – 8 år: 600910

XS: 600915

S/M: 600920

M/L: 600922

L/XL: 600925

Sesam nr: Junior 4 – 8 år: 49091

XS: 49092

S/M: 49093

M/L: 49094

L/XL: 49095

Riktlinje: Barn 04 27 18 Vuxen 04 27 18

Storlek: Junior (4-8 år): 1 kg, XS: 2kg, S/M: 2,5kg, M/L: 3kg och L/XL: 3,5kg.

Beskrivning: Kedjeväst® är en dagprodukt som framför allt påverkar känsel- och muskel-/ledsinnen. Användaren får stimulering tack vare dess tyngd och omslutande effekt. Med hjälp av de tre justerbara resårbanden med kardborre kan man själv anpassa trycket mot kroppen. Trycket ger en tydlig återkoppling på kroppens gränser och effekten blir en ökad kroppsuppfattning. Västen har även kardborreband vid axelbanden vilket gör den lätt att ta på och av även vid begränsad rörlighet i axel, samt för att individanpassa västens längd efter överkroppens längd. Trycket hjälper kroppen att själv slappna av och komma till ro genom yttre stimulans.

Tyngdkragen Somna Collar finns som tillbehör till västen. Det är viktigt att västen sitter nära kroppen så du kommer åt den omslutande effekten. På Abilias hemsida finns måttabell för att hitta rätt storlek, storlek mäts i bröstomfång.

Tvätt: skontvätt 60 grader i medföljande tvättpåse



Hjälpmedelsservice**Tyngdkrage Somna Collar**

Leverantör: Abilia
Lev. art.nr: Junior: 500266
XS: 500267
S-XL: 500268
Sesam nr: Junior: 49122
XS: 54050
S-XL: 54051
Riktlinje: 042718
Storlek: Junior: 1 kg
XS: 1,5 kg
S-XL: 2kg



Beskrivning: Somna Collar bidrar till en ökad kroppsuppfattning och koncentrationsförmåga, den hjälper till att sänka spänning i kropp och axlar. Tyngdkragen är ergonomiskt utformad då den går ut över bröstkorgen och ner mellan skulderbladen utan att belasta nacken. Somna Collar kan används både i stillasittande och i rörelse.

Hjälpmedelsservice
Tyngdväst Fibertyngdväst

Leverantör: Novista

Lev. art.nr: Storlek:

110 – 116: 008131115

122 – 128: 008131116

134 – 140: 008131117

146 – 152: 008131118

Xsmall: 008131119

Small: 008131120

Medium: 008131121

Large: 008131122

XL: 008131123

XXL: 008131124

Sesam nr: Storlek:

110 – 116 1,0 kg: 47290

122 – 128 1,5 kg: 47291

134 – 140 2,0 kg: 47292

146 – 152 2,5 kg: 47293

Xsmall: 44808

Small: 43601

Medium: 43602

Large: 43603

XL: 43604

XXL: 43605

Riktlinje: Barn 04 27 18 Vuxen 04 27 18

Storlek: Se ovan

Beskrivning: Fibertyngdvästen omsluter kroppen, som i sin tur påverkar kroppens proprioceptiva sinnen. Bäraren upplever ett lugn och får det lättare att koncentrera sig. Fibertyngdvästen har en kraftig insydd resår i midjan som spänns åt efter egen önskan. På så sätt regleras känslan av vikt och tryck. Vikten i tyngdvästen kommer från polyesterfibertrådar. Kan torkas av med fuktig trasa. Vid tvätt öppna dragkedjan och låt kardborregördeln vara helt stängd. Tvätta gärna i tvättpåse i max 60 grader. Ska inte torktumlas.



Hjälpmedelsservice**Tyngdkrage**

Leverantör: Novista
Lev. art.nr: S (122/128cl): 008131125

M: 008131126

L: 008131127

Sesam nr: S: 54047

M: 54048

L: 54049

Riktlinje: 04 27 18

Storlek: S: 1 kg

M: 1,5 kg

L: 2 kg

Beskrivning: Tyngdkragen ligger naturligt och bekvämt på axlarna och runt nacken samt ner över bröstkorgen. Tyngden skapar ett lätt tryck som sänker axlarna och ger en avslappnad nacke. Kragen kan ge lugn och trygghet till personer som behöver hjälp med att komma till ro, skapa välbefinnande, sinnesfrid och öka koncentrations- och inlärningsförmågan.



Hjälpmedelsservice
Tyngdväst Protac MyFit Bollväst

Leverantör: Komikapp

Lev. art.nr: Storlek:

Barn 25 mm bollar:

Barn ca 1 kg: 503961

Junior ca 1,2 kg: 503962

XXS ca 1,7 kg: 503963

Vuxen 38 mm bollar:

S ca 3,5 kg: 503954

M/L ca 4 kg: 503955

XL/2XL ca 4,5 kg: 503956

3XL/4XL ca 5 kg: 503957

Sesam nr: Storlek:

Barn 25 mm bollar:

Barn ca 1 kg: 43748

Junior ca 1,2 kg: 43749

XXS ca 1,7 kg: 43750

Vuxen 38 mm bollar:

S ca 3,5 kg: 42323

M/L ca 4 kg: 42371

XL/2XL ca 4,5 kg: 42372

3XL/4XL ca 5 kg: 42373

Riktlinje: Barn 04 27 18 Vuxen 04 27 18

Storlek: Se ovan

Beskrivning: En sinnesstimulerande tyngdväst med bollar som lugnar, avgränsar och ger en bättre kroppsuppfattning. Bollvästen är ett sensomotoriskt hjälpmedel som ger ro och hjälp till ökad koncentration under dagen. Tyngden och det rörliga punktvisa trycket från västen ger information om kroppens gränser och därmed en ökad kroppsuppfattning. 25 mm bollar ger ett måttligt stimuli.

Tvätt: tvättas i 60 grader i medföljande tvättpåse. Torkas liggande eller i torktumlare max 30 grader.



Hjälpmedelsservice**Tyngdkrage Protac SensOn**

Leverantör: Komikapp

Lev. art.nr: Junior: 504493

XS/S: 504494

M/L: 504495

Sesam nr: Junior: 54070

SX/S: 54071

M/L: 54072

Riktlinje: 04 27 18

Storlek: Junior: 2kg, XS/S: 2,5kg och M/L: 3kg



Beskrivning: Tyngdkrage Protac SensOn® är en avkopplande krage som ligger naturligt och bekvämt runt nacke, axlar och bröst. Tyngden och den taktila stimulansen hos de små bollarna sänker axlarna och ger en avslappnad nacke. Det kan ge välbefinnande, sinnesfrid och öka koncentrationen och inlärningsförmågan. Används med fördel i klassrummet, på jobbet, i måltidssituation, i samtal, vila eller i ADL-träning.

Hjälpmedelsservice**Sittdyna Protac Bolldyna**

Leverantör: Komikapp

Lev. art.nr: Storlek:

30x35, 25mm bollar: 502799

40x40, 25mm bollar: 502799

40x40, 25mm bollar med fack: 502798

30x35, 38mm bollar: 500029

40x40, 38mm bollar: 500027

40x40, 38mm bollar med fack: 502225

Sesam nr: Storlek:

30x35, 25mm bollar: 37613

40x40, 25mm bollar: 35122

40x40, 25mm bollar med fack: 53539

30x35, 38mm bollar: 42056

40x40, 38mm bollar: 35121

40x40, 38mm bollar med fack: 53540

Riktlinje: Barn 04 28 09 Vuxen 04 28 09

Storlek: Se ovan

Beskrivning: Bolldynan ger en dynamisk sittställning. Fyllningen som är lätt rörlig, ger balansträning och får kroppen att finna tyngdpunkten. De posturala reflexerna stimuleras och impulserna får den sittande att sträcka på sig. Koncentration och inlärning går lättare, eftersom inte så mycket energi förbrukas på kroppshållningen.

Bolldyna med mindre bollar ger mindre stimuli och upplevs mjukare, (snabbare tillvänjning).

